

Trusti Tuber,

Nouveau



TRUSTI TUBER

Le drenchage sans stress de

TRUSTI TUBER (ANT01A)

CONCEPTION UNIQUE ET FACILITE D'USAGE

- Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit significativement le stress et l'inconfort du veau. Le tube transparent doux et flexible s'ingère facilement, le veau se débat beaucoup moins, permettant un drenchage efficace et rapide.
- Embout rigide qui se maintient d'une seule main
- Capacité importante de 4 litres
- Tube flexible transparent permettant le contrôle de l'écoulement et facilitant le nettoyage
- Poignée ergonomique, parfaite pour mains larges ou petites
- Valve performante, pour un débit rapide même avec du colostrum épais
- Les tests indiquent une réduction de près de moitié du temps de drenchage

e carré farago.com



Bague de blocage et indication du poids du veau pour un positionnement facilité du tube flexible

Embout sécurisé

L'embout rigide se place confortablement contre le museau

Le tube flexible s'enfonce au travers de l'embout rigide pour un positionnement facilité dans l'œsophage

Support de l'embout sur la bouteille pour le maintenir propre

Livré avec une tétine pour une transition facile entre biberon et drenchage



1



L'embout rigide s'installe confortablement contre le museau.

2



Glissez le tube flexible au travers de l'embout rigide pour entrer dans l'œsophage.

œsophage.

3




Bague de blocage et marqueurs de poids du veau pour un positionnement facilité.

Quand le tube flexible est bien placé dans l'œsophage il est possible de relever la bouteille.

REGLE IMPORTANTE

Ne jamais laisser s'écouler le liquide avant que le tube ne soit placé dans l'œsophage.

4

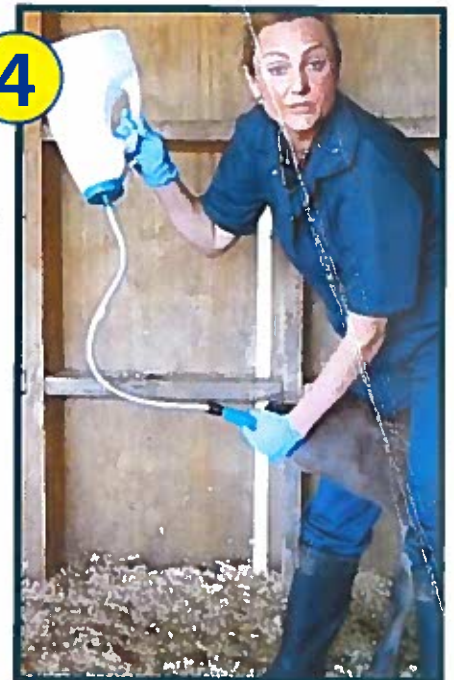

Pendant le drenchage:

Maintenir l'embout rigide en place tout au long du drenchage. Le tenir en même temps que le museau du veau, ainsi il suivra les mouvements éventuels de la tête. Ne pas laisser le tube flexible ressortir de plus de 2.5 cm durant l'écoulement. Ne jamais laisser le veau baisser sa tête au-dessous du niveau de son estomac.

Retrait du tube:

Attendre au moins une seconde après que le liquide ait fini de s'écouler dans le tube puis le retirer doucement.

BAGUE DE BLOCAGE ET MARQUEURS DE POIDS:


- Veuillez considérer les marquages de poids du veau comme des longueurs minimales d'introduction du tube flexible à atteindre.
- La bague de blocage doit être positionnée à droite du marquage
- Ne sous-estimez pas le poids du veau car il vaut mieux introduire le tube plus loin que pas assez.



Si vous drenchez un groupe de veau, nous vous recommandons de régler la bague sur le poids du veau le plus lourd.



ANT10A

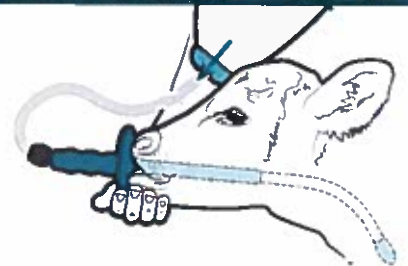

TRUSTI TUBER

Retrouvez nos vidéos de démonstrations
www.dairyspares.fr
et
www.antahi.com

ANTAHI