


Kenotest™

Directions of use · Mode d'emploi · Gebruiksaanwijzing · Anwendung

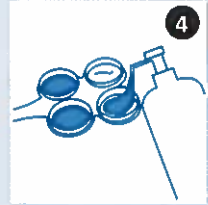

CMT	CCI (cells/ml)	Interpretation · Interprétation · Interpretatie · Beurteilung
-	0 - 200.000	<p>EN Liquid mixture without gel FR Mélange liquide sans précipitation NL Vloeibare mengeling zonder gel DE Das Gemisch bleibt flüssig, kein Schlierenbildung</p> <p>Suspicious infection · Suspicion d'infection · Waarschijnlijke infectie · Vermütlich Infektion</p>
0	200.000 - 500.000	<p>EN Light gel visible by transparence, will disappear after 10 seconds FR Gel léger visible par transparence disparaissant après une dizaine de secondes NL Lichte doorzichtige gel die verdwijnt na een 10-tal seconden DE Das Gemisch zeigt leichte Schlierenbildung, verschwindet nach 10 Sekunden</p>
1	500.000 - 1.000.000	<p>EN Visible light gel by transparence, persistent FR Gel léger visible par transparence, persistant NL Lichte gel, doorzichtig en blijvend DE Das Gemisch zeigt leichte Schlierenbildung, persistent</p> <p>Long lasting infection · Infection de longue durée · Langdurige infectie · Sehr Starke Infektion</p>
2	1.000.000 - 5.000.000	<p>EN Visible gel, adhesion to the cup, visquous filament FR Gel visible et adhérence au fond en filaments visqueux NL Zichtbare gel, klevend DE Das Gemisch zeigt eine starke Schlierenbildung, klebend</p>
3	> 5.000.000	<p>EN Strong gel like the white of egg FR Gel épais comme du blanc d'oeuf NL Dikke gel (zoals eiwit) DE Das Gemisch zeigt eine aussergewöhnlich starke Schlierenbildung und eine feste Masse wie Eiweiss</p>



CID LINES
 innovative hygiene solutions